

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

Customer Service Report

Số/No.: LUXMED30072025

Tên Khách Hàng/Customer Name: **TRUNG TÂM Y TẾ IA H'DRAI**

Địa Chỉ/ Address: **Xã Ia Toi, Tỉnh Quảng Ngãi**

Điện thoại/Tel:

Người Liên Hệ/Contact Name:

THÔNG TIN THIẾT BỊ/ EQUIPMENT

Hỏng/ System down?

☐ No

☒ Yes

Loại thiết bị/

Equipment type

HỆ THỐNG XQUANG

Thời gian kiểm tra:

30/07/2025

Model:

JUMONG

Serial No:

SGJG1806194

Notes

Chi tiết/ Service Details

Service type/

Kiểu dịch vụ

☐ Warranty

Bảo Hành

☐ Maintenance

Bảo Trì

☒ Chargeable

Tính Phí

Tình Trạng/Status/Error	Nguyên Nhân/Origin of trouble	Cách Khắc Phục/Solution
- Hệ thống cơ khí của Xquang không di chuyển được. - Đèn canh tiêu điểm không sáng. - Tấm nhận ảnh bị rò điện. - Hình ảnh thu được của tấm nhận ảnh bị mờ ở xung quanh viền hình ảnh thu về.	- Hỏng khối nguồn cấp điện cho mạch điện điều khiển các chuyển động cơ khí và đèn canh tiêu điểm. - Hỏng mạch điện điều khiển các chuyển động cơ khí. - Rò điện tấm nhận ảnh do không tiếp đất cho hệ thống thu nhận ảnh.	- Sửa chữa khối nguồn cấp điện cho mạch điện điều khiển các chuyển động cơ khí và đèn canh tiêu điểm. - Sửa chữa mạch điện điều khiển các chuyển động cơ khí. - Bảo trì, cân chỉnh và calibration lại hệ thống nhận ảnh.

Status after service

Tình trạng sau khi sửa chữa

☐ Complete

Hoàn Thành

☐ Pending for spares

Chờ thay thế linh kiện

☒ Incomplete

Chưa Hoàn Thành

☐ Under observation

Theo dõi thêm

Ghi chú/Remarks: Tính phí

EVENTS | Thời gian bắt đầu/ Start of service 30/07/2025

| Thời gian kết thúc/ End of service



GIAM ĐỐC
Triệu Tuấn Phước



Đỗ Ngọc Diệp

